

5. Torque e velocità raccomandate

Sistema Implantare Neoss – Torque raccomandato (Ncm)

Impianti	Maschiatori		Guarigione		Provisorio		Impronta	Protezzazione finale						
	Vite di copertura	Pilastro di guarigione in PEEK e Pilastro di guarigione estetico	Pilastro di guarigione Tissue Former estetici	Pilastri provvisori T1	Vite per transfer da impronta	Vite per pilastro Neo		Pilastro Access Dritto e Angolato	Vite protesica Access Neo	Pilastro a pallina, anche su Access	Pilastro Equator			
45 Max	40–45	10 Max	10 Max	10 Max	20	20	10 Max	32*	32	20	20	a livello dell'impianto di Access	32	20

* 35 Ncm opzionale per casi con carichi elevati

Sistema Implantare Neoss – Velocità raccomandata di fresatura ed inserimento (rpm)

Frese	Maschiatori	Svasatori	Impianti	Bone Remover Bone Profiler
800–2000**	20	800	20 Max	40 Max

** Velocità inferiori per diametri più larghi

Limitazione di responsabilità

I prodotti Neoss possono essere usati soltanto in conformità alle istruzioni e alle raccomandazioni del produttore.

Chi utilizza i prodotti Neoss è tenuto a stabilire se tali prodotti sono adatti a un particolare paziente e a particolari indicazioni.

La Neoss Limited esclude qualsiasi responsabilità, espressa o implicita, e non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi danno diretto, indiretto, punitivo o altro danno provocato o collegato a qualsiasi errore verificatosi nel giudizio professionale o nella pratica in relazione all'utilizzo o all'inserimento dei prodotti Neoss.

Le immagini dei prodotti non sono in scala e sono soggette a modifiche.

Copyright, diritti sul design e marchi di fabbrica:

La documentazione Neoss, il software e le illustrazioni non possono essere riprodotti, copiati o pubblicati interamente o in parte senza previa autorizzazione scritta da parte della Neoss Limited. Neoss, il logo "N", NeoLink, NeoLoc e Neoss ProActive sono marchi registrati di Neoss Ltd.

Avvertenza:

La legge federale (USA) limita la vendita di questi strumenti da parte o per ordine di un dentista o di un medico.



Neoss AB
Arvid Wallgrens backe 20
413 46 Göteborg
Sweden
T +46 (0)31 88 12 80
W www.neoss.com



L'assortimento di impianti Neoss ha l'autorizzazione FDA per carico e funzione immediata, nella riabilitazione della funzione masticatoria quando vi sia sufficiente stabilità ossea ed un appropriato carico occlusale.