

Revolutionerande
2-i-1 lösning

Estetisk Läkdistans med ScanPeg™

Intelligent Simplicity

Ett smartare, *patientvänligt* *och mer effektivt* arbetsflöde

Estetisk Läkdistans med ScanPeg är en kombination av läkdistans och skanningsdistans i en revolutionerande 2-i-1 lösning. Denna förenklade, patientvänliga och lätta metod för noggrann intraoral skanning bevarar mjukvävnaden och upprätthåller den biologiska förseglingen då läkdistansen inte tas bort vid skanning.

- ✓ Färre steg, färre besök
- ✓ Protetik för ett eller flera implantat
- ✓ Ostörd läkning: Utmärkt estetik
- ✓ Digital emergence profilen

Ge behandling med *färre steg*

Enklare hantering ger en snabbare, förbättrad process

- Mindre stoltid, färre behandlingssteg
- Minimerade komponentbyten
- Effektiv intraoral skanning

Utmärkt estetik


- Ostörd läkning
- Perfekt matchning med Neoss individuella distanser och standarddistanser
- Biologisk försegling upprätthålls, vävnadsnivån bevaras



Färre steg, färre besök och vävnadsvänlig

01 Placering av läkdistanans


Estetisk Läkdistanans placeras under första eller andra steget av operationen och lämnas tills den permanenta distansen är placerad.

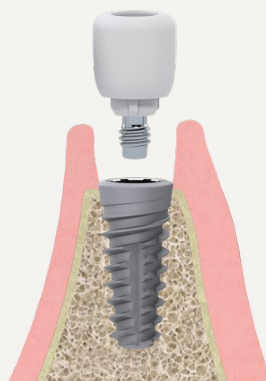

02 Placering och skanning av ScanPeg

Medan den Estetiska Läkdistanansen sitter kvar på plats utförs en intraoral skanning på distansnivån med hjälp av ScanPeg. ScanPeg levereras tillsammans med den Estetiska Läkdistanansen och är lätt att både fästa och ta bort.

Det intraorala digitala avtrycket kan tas när du vill. ScanPeg-formen ingår i Neoss CAD-bibliotek.

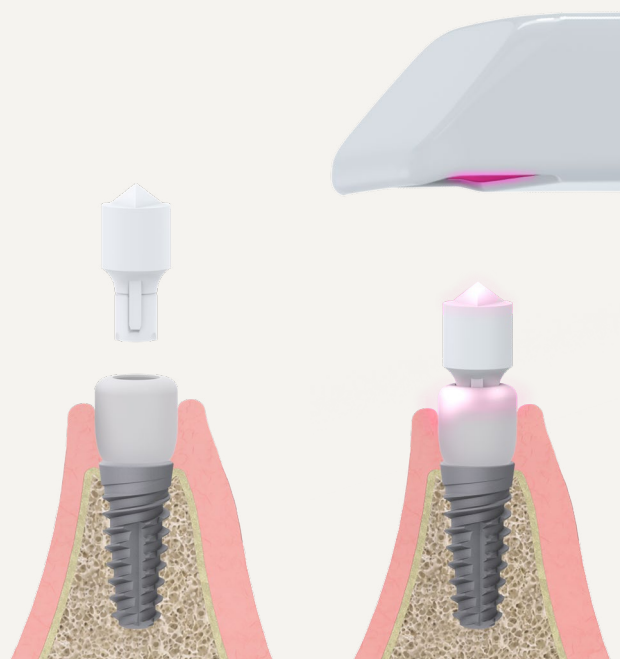

03 Placering av den slutliga protetiken

Flexibiliteten med ScanPeg när du tar det digitala avtrycket gör att estetiken kan förbättras under läkningsfasen. Den Estetiska Läkdistanansen tas inte bort förrän den slutliga protetiken är placerad vilket eliminerar ett helt kirurgiskt ingrepp.

Alla konturer med Estetiska Läkdistanans ingår i Neoss CAD-bibliotek för att skapa en bild av uppkomstprofilen från patientens kontur till slutlig protetik.



exocad 3shape


Skanningsdistans för protetik *med eller och flera implantat*

Estetisk Läkdistans med ScanPeg möjliggör protetik för ett eller flera implantat.

Uppföljning av fall med flera implantat som behandlats och skannats med Estetisk Läkdistans med ScanPeg visar utmärkta resultat när det gäller passiv inpassning av protetiken. Radiologisk stabilitet av bennivån runt implantatet passar i alla protokoll som har prövats under en lång tidsperiod.

01 Placering av ScanPeg

ScanPeg levereras tillsammans med Estetisk Läkdistans och är lätt att både fästa och ta bort.

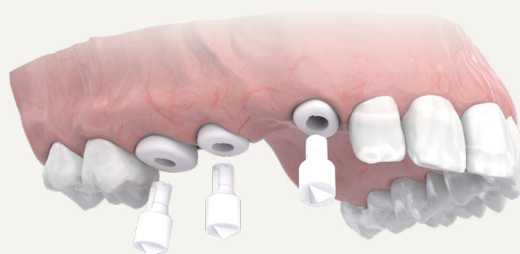

Kliniskt fall

Protetik för ett fall med flera implantat med hjälp av Estetisk Läkdistans med ScanPeg. Passiv inpassning av den slutliga protetiken uppnås.



Dr. Jakob Zwaan
Tandläkare
Calusco D'Adda, Italien

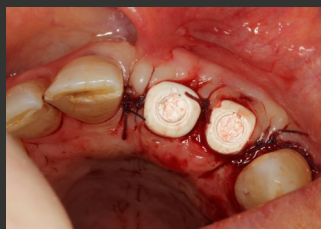


Bild 1. Två 4,0 × 13 mm Neoss ProActive® Tapered-implantat placerades i position 11 och 12. Två Estetisk Läkdistans – framtand (bred och smal) placerades före positionering av benersättning för att öka den buckala volymen.

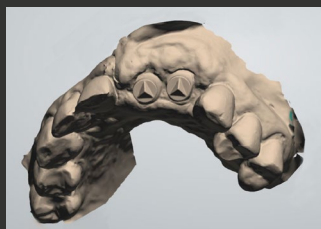


Bild 2. Vid tidpunkten för borttagning av sutur satt ScanPegs inuti de Estetiska Läkdistanserna och en intraoral skanning gjordes utan att man behövde ta bort distanserna. Fördelen är att mjukvävnad får läka ifred och att dislokation av transplantatmaterial undviks.



Bild 3. Slutlig protetik (en anpassad CoCr-struktur från ARC Solution, med keramiklager) vid placeringstillfället, som visar frisk vävnad runt implantatet.



Bild 4. Radiografisk bild som visar stabila bennivåer.



Skanna QR-koden för att se hela fallserien.

Kliniskt fall

02 Digitalt avtryck med NeoScan™ 1000

Det digitala intrycket kan tas när du vill. ScanPeg-formen ingår i Neoss CAD-bibliotek.



03 Placering av den slutliga bron

Alla typer/konturer av Estetisk Läckdistans är inkluderade i Neoss CAD-bibliotek för att kunna matcha emergence profilen från patientens mun till den slutgiltiga restorationen.

exocad 3shape ▶




Din lösning för *digitala avtryck*

NeoScan 1000 är en snabb, exakt och lättanvänd intraoral skanner som möjliggör ett flexibelt arbetsflöde. Den passar mycket bra med Neoss estetisk läckdistans med ScanPeg och är precis det som din praktik behöver.

- ✓ Lätt att använda
- ✓ Snabb och exakt skanning
- ✓ Öppet system – implantat, proteser och ortodonti
- ✓ Bra pris och inga licensavgifter




Digital Enkelhet för dig och dina patienter

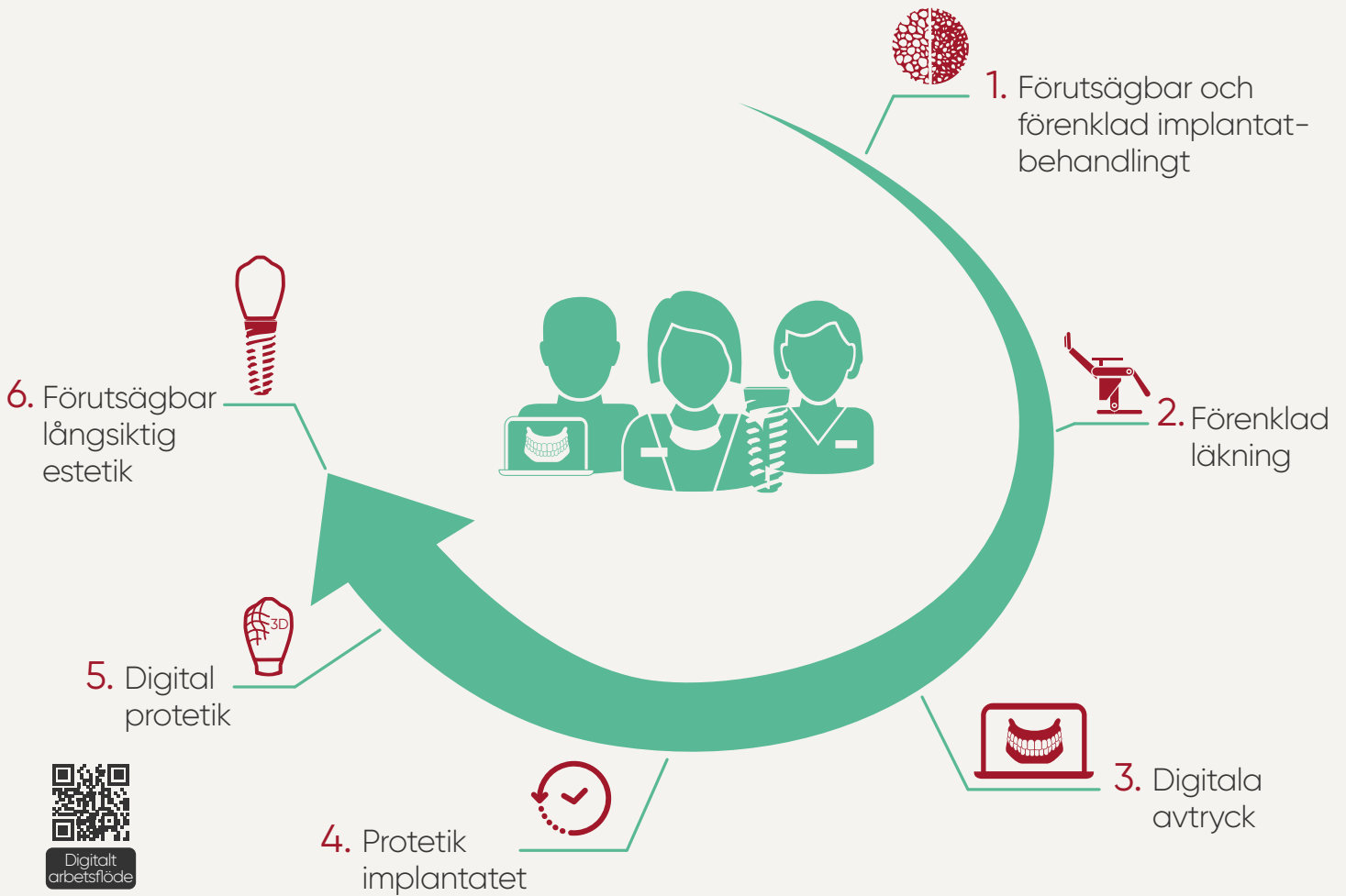

Sortiment

Art. Nr.	Beskrivning
31360	Estetisk Läkdistans med ScanPeg – bred framtand
31361	Estetisk Läkdistans med ScanPeg – smal framtand
31362	Estetisk Läkdistans med ScanPeg – hörntand
31363	Estetisk Läkdistans med ScanPeg – premolar
31364	Estetisk Läkdistans med ScanPeg – molarr
31365	ScanPeg – 5 st

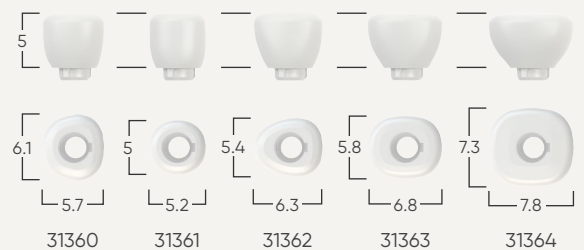

SVERIGE, DANMARK, NORGE KONTORET

Neoss Norden AB

Arvid Wallgrens backe 20

SE-413 46 Göteborg

T: +46 (0)31 88 12 80

E: info@neoss.se

E NeoScan: neoscan.support.se@neoss.com

För support, besök vår hemsida:

neoss.com/neoscan1000

NeoScan kundsupport: +46 423 110 485

Kontakta din lokala representant för information om produktens tillgänglighet. Alla produkter finns inte i alla länder.

15202_1 SE 23-02 © Neoss Group, 2023. Upphovsrättigheter, designrättigheter och varumärken, Neoss-dokument, program och designer får inte tryckas på nytt, kopieras eller publiceras helt eller delvis utan Neoss skriftliga tillstånd. Neoss, N-logotypen och NeoScan™ är varumärken som tillhör Neoss Group.