

Quello che vedi è *tutto ciò di cui hai bisogno*

Box del Sistema implantare ProActive®

- ✓ Pochi strumenti
- ✓ Facile da pulire e sterilizzare
- ✓ Strumenti chirurgici e protesici in un unico box

Caratteristiche e vantaggi

Box – Scatola compatta con coperchio apribile e rimovibile con una sola mano.

Vassoi – Tappetini modulari che tengono gli strumenti in posizione.


Il vassoio chirurgico grigio presenta il protocollo di fresatura, con marcatura NP e SP e spazio per riporre ulteriori strumenti chirurgici.

Il vassoio protesico rosso ha gli strumenti disposti in modo da facilitarne l'organizzazione e la conservazione.

Sonda di misurazione di profondità – Ha due lati con marcature di fresatura e diverse funzionalità. Un lato si inserisce nell'osteotomia di preparazione realizzata con la fresa da Ø 2,2 mm e presenta, oltre alle marcature di profondità, un'estremità sferica per l'ispezione della superficie ossea con sensazione tattile. L'altro lato è per l'osteotomia di preparazione eseguita con la fresa da Ø 3,0 mm e superiore per verificare la profondità di fresatura. L'impugnatura è sagomata per migliorare la maneggevolezza ergonomica per l'utente.



Sonda di misurazione di profondità

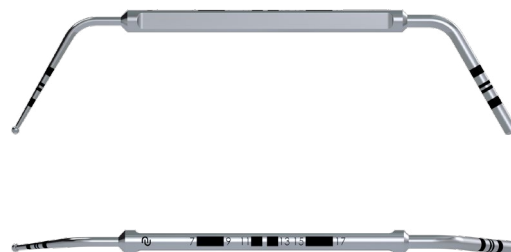


Assortimento

N. art.	Descrizione
51186	Box del sistema implantare Neoss ProActive®
51187	Vassoio chirurgico e protesico Neoss - ProActive® Straight
51188	Vassoio chirurgico e protesico Neoss - ProActive® Tapered
51189	Vassoio chirurgico e protesico Neoss - ProActive® Edge
51190	Sonda di misurazione di profondità


Non tutti i prodotti sono disponibili in tutti i mercati.

Panoramica sull'allestimento chirurgico e protesico


ProActive® Edge Ø 3,5 - 5,0 mm

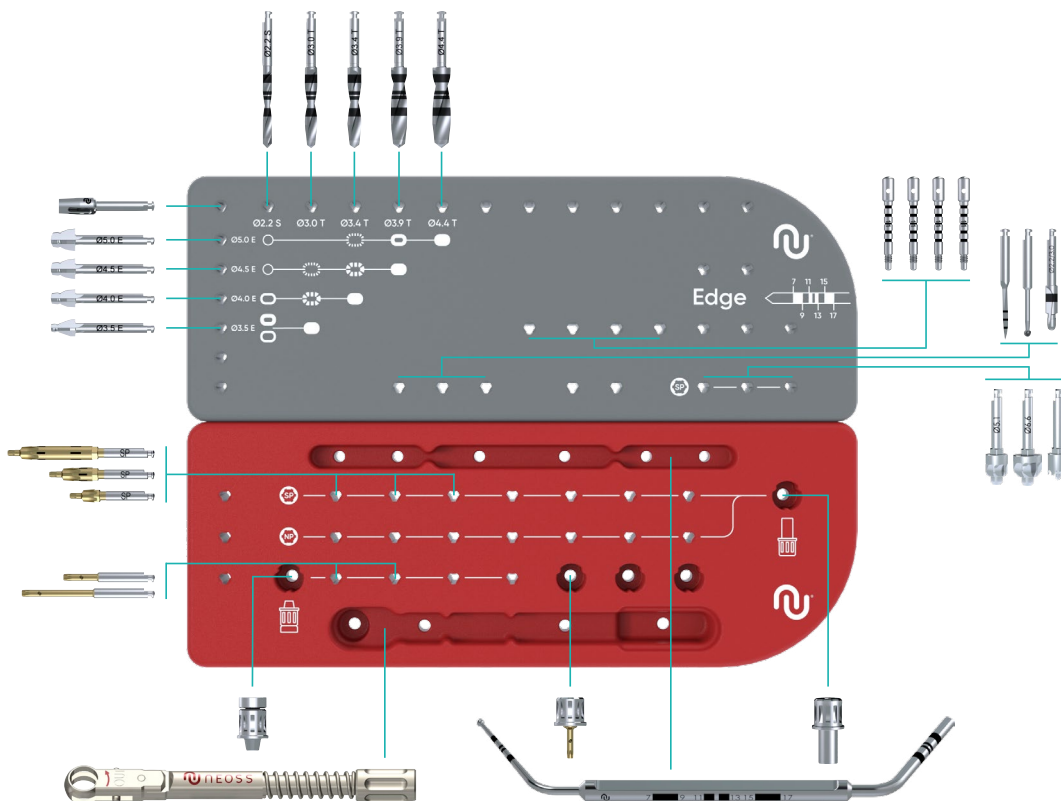

ProActive® Straight Ø 3,5 - 5,5 mm + ProActive® Straight, Ø 3,25 NP

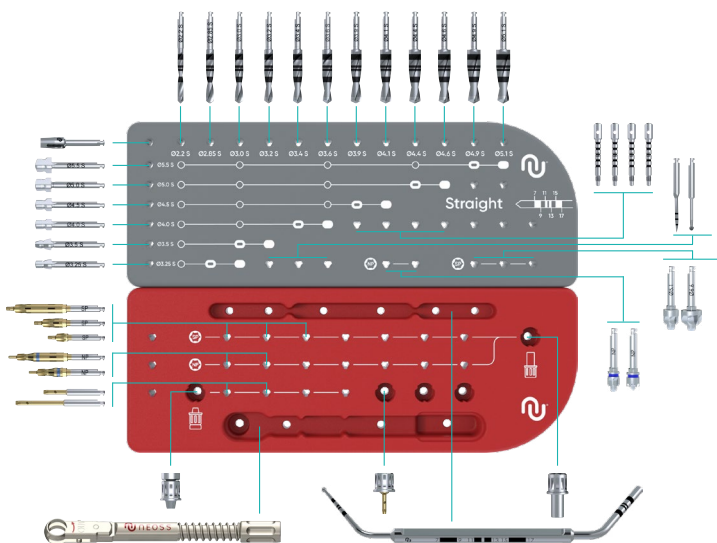

ProActive® Tapered Ø 3,5 - 5,5 mm

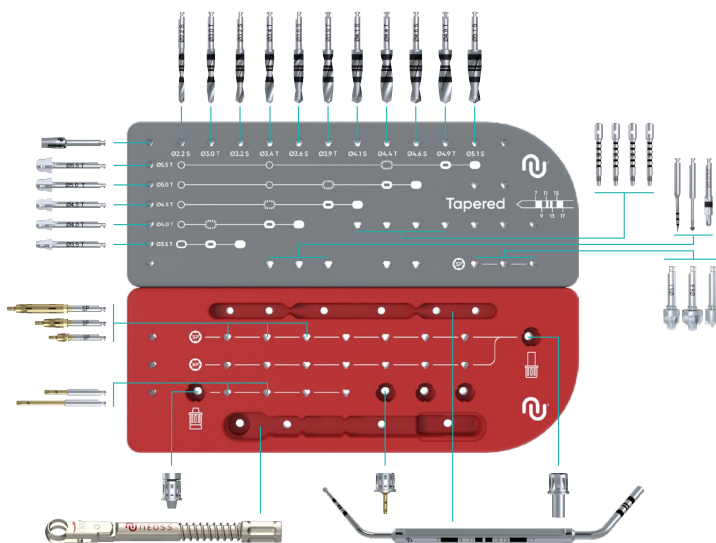

15457_0 IT 2023-02 © Neoss Group, 2023. I copyright, i diritti su design e i marchi registrati, i documenti, i software e i design di Neoss non possono essere ristampati, copiati o pubblicati, integralmente o parzialmente, senza l'autorizzazione scritta di Neoss. Neoss, il logo N e NeoScan™ sono marchi registrati di Neoss Group.