





VETENSKAPLIGA REFERENSER

1. Sennerby L. Implantologie 2013;21(1):21-33
2. Kokovic V, Jung R, Feloutzis A, Todorovic V, Jurisic M, 2. Hämmerle C. Clinical Oral Implants Research, 00, 2013, 1-6
3. Bornstein M, Hart C, Halbritter S, Morton D, Buser D. Clin Implant Dent Relat Res 2009
4. Serge Baltayan, Joan Pi-Anfruns, Tara Aghaloo, Peter Moy. J Oral Maxillofac Surg 74:1145-1152, 2016
5. Östman P-O. Clinical Implant Dentistry and Related Research, Volume 7, Supplement 1, 2005
6. Rodrigo D, Aracil L, Martin C, Sanz M. Clin. Oral Impl. Res. 21, 2010; 255-261
7. Pagliani L, Sennerby L, Petersson A, Verrocchi D, Volpe S & Andersson P. Journal of Oral Rehabilitation 2012
8. Trisi P, Carlesi T, Colagiovanni M, Perfetti G. Journal of Osteology and Biomaterials, Volume 1, Number 3, 2010
9. Stefan Paul Hicklin, Esther Schneebeli, Vivianne Chappuis, Simone Francesco Marco Janner, Daniel Buser, Urs Brägger, Clin. Oral Impl. Res 00, 2015; 1-9



Det ovanstående är en sammanfattning av vetenskapliga data och inte en officiell rekommendation från Neoss. För att övervaka osteointegrationen, mät vid placering och innan slutlig återställning.

15606_0 SE 23-04 © Neoss Group, 2023. Upphovsrättigheter, designrättigheter och varumärken, Neoss-dokument, program och design för inte tryckas på nytt, kopieras eller publiceras helt eller delvis utan Neoss skriftliga tillstånd. Neoss, N-logotypen och NeoTell™ är varumärken som tillhör Neoss Group.